

APEX[®]

konsequent individuell



Die 10 häufigsten Fragen und Antworten zur formstabilen ACL und APEX[®]-Software

1. Was ist eine ACL?

Eine maßgeschneiderte AnpassContactLinse, ganz nach Ihrem Wunsch! Im Gegensatz zu Meß- und Leihlinsen wird die ACL in nahezu allen Parametern gefertigt. Somit kann bereits in der Anpassphase der erste Seheindruck für Ihren Kunden zu einem sehr positiven Erlebnis werden.

2. Was kostet eine ACL?

Bitte entnehmen Sie die Preise unserer aktuellen Preisliste

3. Wie unterscheidet man die ACL von einer endgültigen CL?

Das ACL-Material wird in zwei auffälligen Farben angeboten. Die rechte ACL wird in grün, die linke in violett gefertigt.



4. Welche Materialeigenschaften liegen der ACL zugrunde?

Es wird ein einfaches gasdurchlässiges Material verwendet. Daher ist die ACL nur für das Probetragen in der Anpassphase geeignet. Bei einer neuen ACL zeigt sich aufgrund der einfachen Materialstruktur manchmal eine verminderte Benetzung. Diese kann durch einen alkoholhaltigen Reiniger spontan optimiert werden.

Materialeigenschaften:

DK (ISO) 15 Brechzahl 1,43 spez.Gewicht: 1,25

5. Welcher formstabile CL-Typ ist als ACL erhältlich?

Rotationssymmetrische ACL: Ascon, BIAS, KA, KAKC, Multicon und Multifile sphärisch, auch kombiniert mit VP

Torische und Bifocale ACL: RT, BTC, Bicon, Bicon RT, Bicon BTC, Multifile RT/BTC

Atelierfertigung: Quadro

Nicht erhältlich als ACL sind: Essential, BT, BTX, VPT

6. Was geschieht mit der ACL nach der Anpassung?

ACL sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Mögliche Verwendungszwecke sind:

- Sie erweitern damit Ihren Anpass-Satz
- Sie behalten eine bereits gut passende ACL als Reservelinse für den Kunden. Bei Verlust können Sie kurzfristig aushelfen.
- oder... Sie entsorgen die ACL.

7. Welche Vorteile bietet eine ACL?

Zeitersparnis!

Der Verwaltungsaufwand für zur Gutschrift zurückgesandte CL entfällt. Das Hygienemanagement entfällt im Vergleich zu eigenen Meßlinsen.

Kostensparnis!

Die ACL ist günstiger als die Rückgabegebühr des jeweiligen CL-Typs. Die Portokosten der Rücksendungen entfallen.

Aufwertung der Serviceleistung!

Die Wertigkeit Ihrer Arbeit steigt enorm durch die individuelle ACL. Durch das Probetragen erhält der CL-Träger ein Gefühl für die Linse und somit Sicherheit. Sie bieten dem Linsenträger von heute eine zeitgemäße Versorgung auf neuestem Stand. Die maßgeschneiderte ACL bietet besten Komfort, hohe Zufriedenheit und größtes Vertrauen in Sie!

8. Benötigt man einen Keratograph, um eine ACL zu bestellen?

NEIN! Jedoch gelingt damit die Parameteerbestimmung erheblich besser.

9. Was beinhaltet die APEX-Software?

Anhand der Messdaten erstellt der Oculus-Keratograph einen Anpassvorschlag mit unserer CL-Typen, den Sie übernehmen oder nach Ihren Vorstellungen modifizieren können. Ist die individuelle CL-Rückfläche festgelegt, kann die Stärke der ACL mit der APEX[®]-Software berechnet werden. Komfortabel und bequem können Sie nun die ACL-Daten ausdrucken und/ oder online bestellen.

10. Was kostet die APEX[®]-Software?

APEX[®] erhalten Sie kostenlos von uns.

Download unter: www.hecht-contactlinsen.at

Die maßgeschneiderte ACL bietet besten Komfort, hohe Zufriedenheit und größtes Vertrauen in Sie!

